

Hoe werkt de Solace?

De Solace is een kleine ronde ballonpomp gevuld met een lokale verdovingsvloeistof, deze heeft als doel om pijn te bestrijden na de operatie.

De pomp is aangesloten op een katheter (dun slangetje) vlakbij de wond. De pomp geeft automatisch een vaste hoeveelheid verdovingsvloeistof af in het operatiegebied.

Gedurende de infusie.


Met behulp van de meegeleverde clip of buidel tas kunt u de Solace gemakkelijk met u meenemen.

Gedurende de dagen dat de pomp aangesloten is zal de ballon geleidelijk aan kleiner worden.

- Verwacht niet dat u de ballon in een korte tijd kleiner ziet worden.
- U hoeft niet in de ballon te knijpen, de ballon regelt zelf de benodigde hoeveelheid druk.
- De loop van de vloeistof door de slang is niet te constateren.
- Controleer of de witte klem openstaat.
- Controleer op knikken in de slang.
- Gebruik geen koude therapie bij de pomp of de slang.

- Bedek de filter niet.

1. Clip
2. Solace Pomp
3. Vul Poort
4. Klem
5. Filter
6. Katheter
- 7.
8. Wondgebied

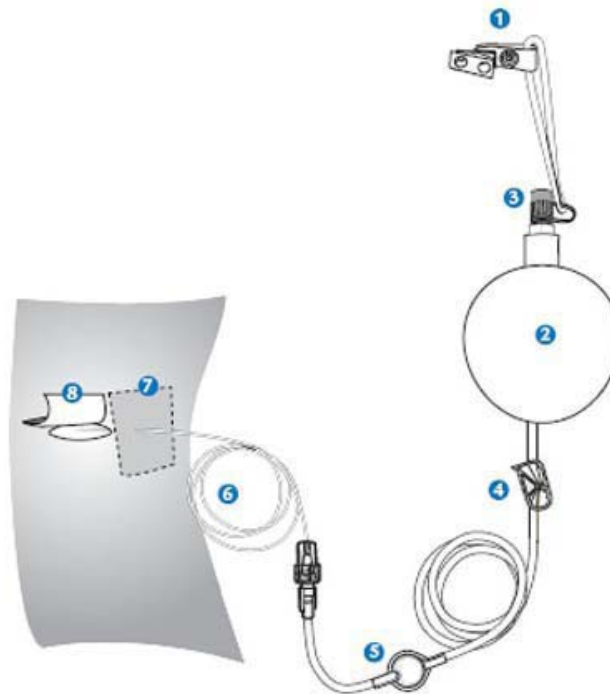

Einde van infusie.

Zodra alle verdovingsvloeistof is afgegeven is de Solace klaar. U kunt nu een harde bal voelen die de elastomeren ballon raakt.

Verwijderen van de katheter.

Als de dokter u instructies heeft gegeven om de katheter zelf te verwijderen volgt u die instructies dan goed op, houdt daarbij de volgende stappen in gedachte:


- Verwijder de pleister of folie waarmee de katheter aan de huid is verbonden.
- Pak de katheter vlak bij de huid vast en trek er rustig aan. Het moet vrij gemakkelijk zijn om de katheter eruit te trekken en niet al te veel pijn doen. Ga niet wild met de katheter om en trek er niet te hard aan. Als het moeilijk is om de katheter te verwijderen, omdat deze vast lijkt te zitten, neemt u contact op met uw behandelende arts. Te hard trekken aan de katheter kan ertoe leiden dat deze kapot gaat.
- Knip niet in de katheter.

- Trek niet te hard aan de katheter.
- Nadat u de katheter heeft verwijderd controleer dan of u aan het uiteinde van de katheter een zwarte markering ziet om er zeker van te zijn dat de volledige katheter uit de wond is. Indien dit niet het geval is neemt u direct contact op met uw behandelende arts.
- Plak een pleister op de plaats waar de katheter uit de huid is gekomen.

(Herhaal de volgende stappen indien u meer dan 1 katheter heeft).

Neem direct contact op met uw behandelende arts wanneer er, na verwijdering van de katheter, sprake is van:

- Rode verkleuring van de huid, warmte of veel bloedverlies uit de insteekopening.
- Pijn, zwelling of een grote blauwe plek rond de insteekopening.

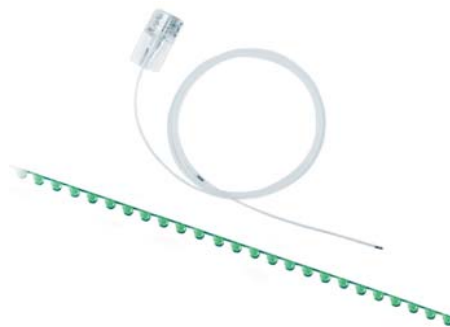

BELANGRIJK.

Gedurende infusie, neemt u direct contact op met uw behandelende arts wanneer u last heeft van:

- Toename in pijn.
- Rode verkleuring van de huid, zwelling, pijn of losraken van de katheter.
- Duizeligheid, 'licht in het hoofd'.
- Wazig, slecht zien.
- Suizen in oor.
- Metaalsmaak in de mond.
- Verdooft of tintelend gevoel in de mond en lippen.
- Overgeven, braken.
- Flauwte.
- Andere bijwerkingen.

Houdt u er rekening mee dat het operatie gebied verdoofd aan voelt.

Voorzorgsmaatregelen.

- Niet hergebruiken.
- Bescherm de pomp en katheter van water in overleg met uw arts.

Medicatie

Medicatie:

Concentratie:

Datum einde infusie:

Neem contact op met uw arts voor medische vragen.

Arts:

Telefoonnummer:

Volgende afspraak

Datum:

Tijd:

Speciale instructies:

*Voor meer informatie over Solace
www.solacepainrelief.com*

Solace Patiëntinformati e



Patient Guidelines